

Points d'attention

Notes

Scans _____ / jour

Valeur actuelle

Historique du glucose

Plage d'objectif

Tendances

- ▲ Glucose monte vite
- ↗ Glucose monte
- Glucose varie lentement
- ↘ Glucose baisse
- ▼ Glucose baisse vite

Glycémie

Cétones

Le taux de glucose baisse

72 mg/dL

Ajouter des remarques

- Insuline à action rapide
- Insuline à action lente
- Nourriture

L'entrer insuline à action rapide

1.0 unités

Lo = < 40mg/dL* Hi = > 500mg/dL

*Lo avec l'électrode : < 20mg/dL



Assistance et information?
 Numéro vert: 0800 167 72 (LUX) 8002 54 87
www.FreeStyleLibre.be www.FreeStyleLibre.lu
 ACP-2016-ADC-151



Regarder les rapports

Notes



Revoir l'historique

- Carnet d'autosurveillance
- Graphique quotidien
- Taux de glucose moyen

1 / 2

- Tendances quotidien
- Durée dans la cible
- Événements hypo
- Usage du capteur

Rapports disponibles

Carnet d'autosurveillance OK

23 fév. 10:23 **143** →

23 fév. 06:37 **98** ↗

22 fév. 23:09 **108** ↘

mg/dL

▼

Graphique quotidien (mg/dL) OK

22 fév. Mercredi

◀ 7 derniers jours ▶

Taux de glucose moyen OK

Moyenne: **119** mg/dL

◀ 7 derniers jours ▶

Usage du capteur OK

Scans par jour **3**

Donées capteur capturées **81%**

◀ 7 derniers jours ▶

Tendances quotidien. (mg/dL) OK

◀ 7 derniers jours ▶

Durée dans la cible OK

Au-dessus **34%**

Dans la cible **54%**

Au-dessous **12%**

Plage cible 80 - 180 mg/dL

◀ 7 derniers jours ▶

Événements hypo. OK

Événements totaux: **10**

◀ 7 derniers jours ▶



Ce produit doit être éliminé conformément à toutes les réglementations locales en vigueur liées à l'élimination des équipements électroniques, des piles, des objets pointus et des matériaux potentiellement exposés aux fluides corporels.



Téléchargez le logiciel FreeStyle Libre sur: www.FreeStyleLibre.be
www.FreeStyleLibre.lu