


Procédure de désinstallation des applications (Sous Windows 7) : FreeStyle Auto-Assist et FreeStyle Libre

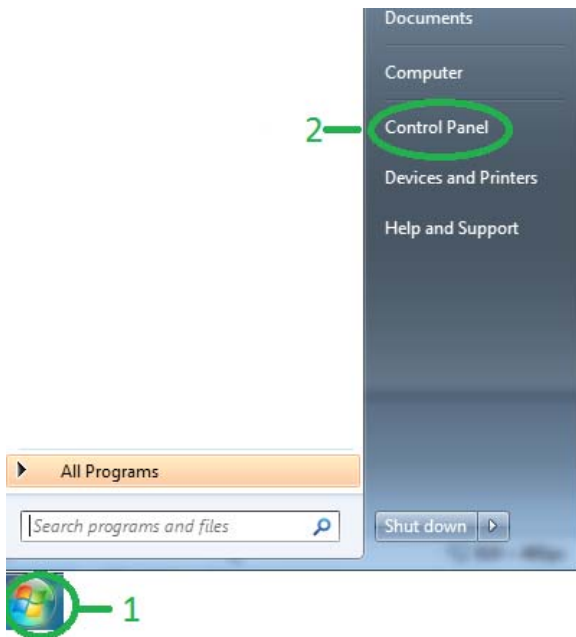


Pour désinstaller une application FreeStyle, plusieurs possibilités se présentent :

- En cliquant sur ce lien, pour l'application FreeStyle Libre:
"[C:\Program Files \(x86\)\FreeStyle Libre\Uninstall FreeStyleLibre.exe](C:\Program Files (x86)\FreeStyle Libre\Uninstall FreeStyleLibre.exe)"
Ou

- En ouvrant le panneau de configuration pour les autres applications FreeStyle.


Cliquez sur l'icône Windows **Démarrez** et choisissez **Panneau de configuration** comme indiqué ci-dessous :

Une fois dans le **Panneau de configuration**, comme au point 3, éditez la vue par catégories et choisissez **Désinstaller un programme** :

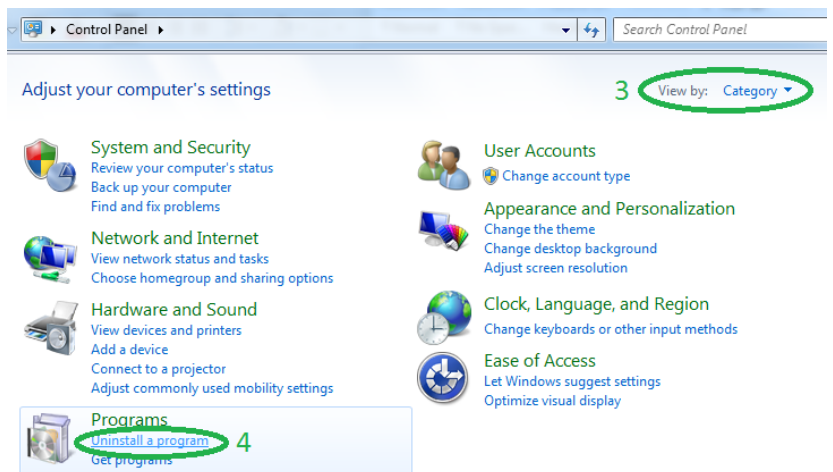

Ceci fait, une liste des applications installées apparaîtra :

Sélectionnez ensuite l'application comme au point 5, que vous souhaitez désinstaller et cliquez sur le bouton **Désinstaller**, comme au point 6.

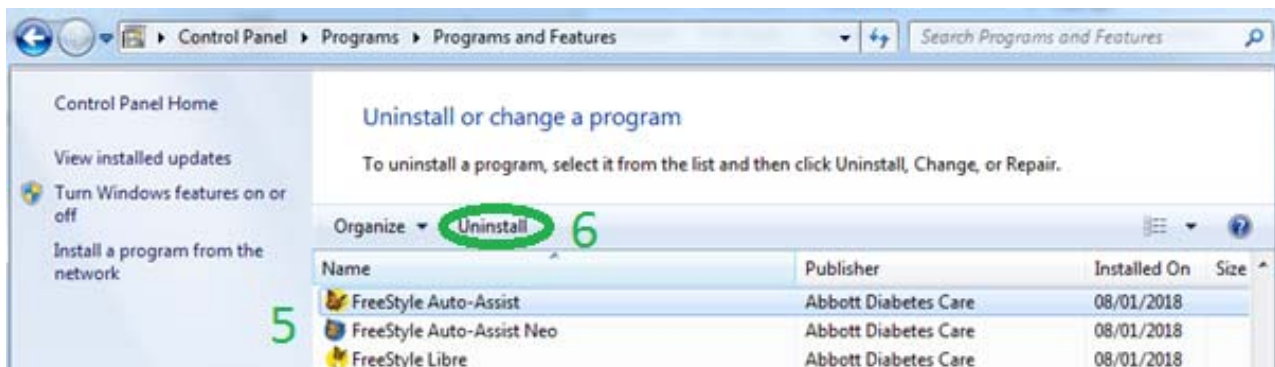



Confirmez ensuite en cliquant sur OK afin que la suite de la désinstallation puisse prendre place.

Procédure de désinstallation des applications (Sous Windows 10) : FreeStyle Auto-Assist et FreeStyle Libre

Vous disposez de Windows 10 ?

Procédez comme suit pour supprimer les applications FreeStyle Auto-Assist / FreeStyle Auto-Assist Neo of FreeStyle Libre :

- Dans le menu Démarrer  , sélectionnez **Paramètres** .
- Sélectionnez **Applications**.
- Sélectionnez le programme **FreeStyle**, puis **Désinstaller**.
- Suivez ensuite les instructions à l'écran.