



FreeStyle Precision Neo

HANDLEIDING

11:55




Testen

01 Was & droog uw handen.




02 Breng de strip in.

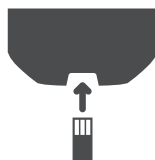

03 Wanneer een **druppel** op het scherm verschijnt, kunt u het **bloed** aanbrengen (0,6 μ L) op de teststrip.

FreeStyle Precision Neo

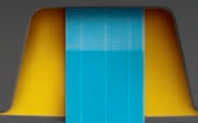

Testen

04 Na het aanbrengen van het bloed **verschijnen 3 lijntjes** die daarna automatisch verdwijnen.

Als de **3 lijntjes helemaal verdwenen zijn**, geeft het aan dat er **genoeg bloed** aangebracht is.

FreeStyle Precision Neo



Testen

05 Vervolgens **telt** de meter af **van 5 naar 1**. Laat gedurende de test de strip in de meter.

06 Wanneer het resultaat op **het scherm verschijnt** is uw test **volbracht**. Verwijder de strip.

De resultaten worden **automatisch bewaard** in de meter.

FreeStyle Precision Neo

:5



Hypo / Hyper glycemie

Indien het resultaat hoger is dan **240 mg/dL** of de door uw **behandelend team** ingestelde limiet, verschijnt het gele pijltje [].

Indien het resultaat lager is dan **70 mg/dL** of de door uw **behandelend team** ingestelde limiet, verschijnt het rode pijltje [].

Volg **het advies van uw medisch team** om eventuele hypo's & hypers te behandelen.

FreeStyle Precision Neo

250

MG/DL

11:55



Glycemische trends

Indien het **rode pijltje** [] begint te knipperen, heeft u een **hypoglycemische trend**:

- 2 of meer resultaten zijn te laag*
- Tijdens de 5 laatste opeenvolgende dagen
- Binnen een tijdsinterval van 3 uur

Volg **het medisch advies op van uw behandelend team** om dit te voorkomen.

*zie pagina HYPO / HYPER

FreeStyle Precision Neo

48

MG/DL

11:55



Glycemische trends

Indien de **gele pijltje** [] begint te knipperen, heeft u een **hyperglycemische trend**:

- 3 of meer resultaten zijn te hoog*
- Tijdens de 5 laatste opeenvolgende dagen
- Binnen een tijdsinterval van 3 uur

Volg **het medisch advies op van uw behandelend team** om dit te voorkomen.

*zie pagina HYPO / HYPER

FreeStyle Precision Neo

250

MG/DL

11:55



Ketonen test

Indien uw resultaat **hoger is dan 240 mg/dL** verschijnt **“KET”** op **het scherm** onder de waarde.

U dient een **ketonen test** uit te voeren volgens uw behandeling.

Voor het testen van ketonen gelieve dezelfde stappen te volgen met de paarse ketonen strip.

FreeStyle Precision Neo

250

KET

MG/DL

11:55





Behoeftte aan meer informatie:



Elke werkdag, tussen 8.30 u en 17.00 u

www.abbottdiabetescare.be

Abbott Diabets Care
Avenue Einstein 14
B-1300 Wavre



ADCFSNEMO100-10f13N