

COMMENT PARAMÉTRER LES ALARMES OPTIONNELLES SUR VOTRE LECTEUR FREESTYLE LIBRE 2 ?



ALARME

Une alarme s'enclenche lorsque votre **taux de glucose** est trop bas ou trop élevé par rapport aux valeurs limites déterminées ou lorsque le signal est perdu.



SCANNEZ

Scannez-vous avec votre appareil FreeStyle Libre 2 pour vérifier votre taux de glucose.



AGISSEZ

Grâce aux **informations** reçues et aux flèches de tendances, agissez en conséquence*.

Le capteur est équipé à la fois de la technologie Bluetooth à basse consommation d'énergie et NFC.



Chaque minute, le capteur transmet vos données au **lecteur**. Une alarme peut s'enclencher.

QUAND L'ALARME SONNE-T-ELLE ?

VOTRE TAUX DE GLUCOSE EST FAIBLE

En fonction de la limite que vous avez définie:
< 60-100 mg/dL.

VOTRE TAUX DE GLUCOSE EST ÉLEVÉ

En fonction de la limite que vous avez définie:
> 120-400 mg/dL.

ALARME DE PERTE DE SIGNAL

Si le lecteur est pendant plus de **20 minutes** à une distance supérieure de **6 mètres**.


COMMENT ACTIVER LES ALARMES OPTIONNELLES ?

Étape 1




Allez dans les **réglages**.

Étape 2

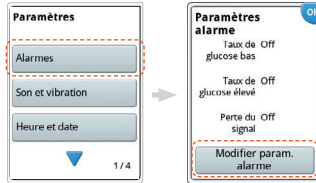


Cliquez sur **Alarmes** ensuite sur Modifier les **paramètres** de l'alarme.

Étape 3

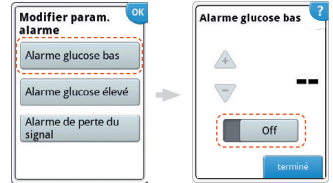


Choisissez l'alarme que vous désirez paramétrer. **Activez-la**.

Étape 4

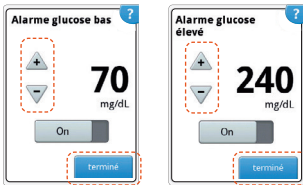


Utilisez les flèches pour configurer les **taux de glucose**.

Étape 5

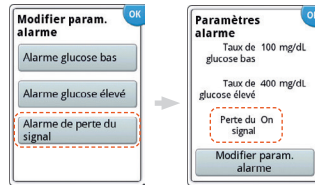

Consultez vos **réglages d'alarme**. L'alarme de perte de signal s'active automatiquement.

Étape 6

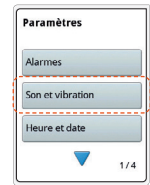

Activer le **son** et/ou la **vibration**.



life. to the fullest.®

Abbott



www.myFreeStyle.be



FreeStyle
Libre 2

SISTÈME DE SURVEILLANCE DU TAUX DE GLUCOSE FLASH



RENSEIGNEMENTS Disponible chaque jour ouvrable de 8:30 à 17:00

B 0800 167 72

L 8002 54 87

0032 800 167 72