

COMMENT PARAMÉTRER LES ALARMES OPTIONNELLES SUR VOTRE APP FREESTYLE LIBRELINK ?



ALARME

Une alarme s'enclenche lorsque votre **taux de glucose** est trop bas ou trop élevé par rapport aux valeurs limites déterminées ou lorsque le signal est perdu.



SCANNEZ

Scannez-vous avec votre smartphone¹ pour vérifier votre taux de glucose.



AGISSEZ

Grâce aux **informations** reçues et aux flèches de tendances, agissez conformément aux recommandations de votre professionnel de la santé.

Le **capteur** est équipé de la technologie NFC pour les lectures de glucose et de la technologie Bluetooth à basse consommation d'énergie pour les alarmes optionnelles.



Pour les alarmes, **chaque minute** le capteur transmet vos données à **votre smartphone²**.

QUAND L'ALARME SONNE-T-ELLE ?

QUAND VOTRE TAUX DE GLUCOSE EST FAIBLE

En fonction de la limite que vous avez définie:
< 60-100 mg/dL.

QUAND VOTRE TAUX DE GLUCOSE EST ÉLEVÉ

En fonction de la limite que vous avez définie:
> 120-400 mg/dL.

QUAND IL Y A UNE PERTE DE CONNEXION

Si votre smartphone est à une distance supérieure de **6 mètres** de votre capteur pendant plus de **20 minutes**.

1. Pour pouvoir activer les alarmes optionnelles, vous devez avoir mis à jour votre application FreeStyle LibreLink à la version 2.4.2.
2. L'application FreeStyle LibreLink n'est compatible qu'avec certains appareils mobiles et systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web www.myFreeStyle.be pour plus d'informations sur la compatibilité des appareils avant d'utiliser l'application.

COMMENT ACTIVER LES ALARMES OPTIONNELLES ?

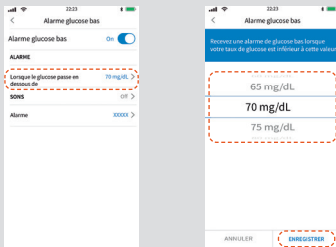
⚠ Les alarmes sont désactivées par défaut

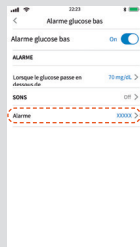
- 1 Cliquez sur **Alarmes** dans le menu principal.¹

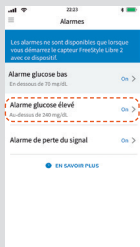

- 2 Cliquez sur **Alarme glucose bas** et activez l'alarme.



L'alarme de perte de signal est automatiquement activée quand une ou plusieurs alarmes de glucose sont activées
- 3 Faites défiler les valeurs pour sélectionner la valeur de **glucose bas** en-dessous de laquelle l'**alarme** se déclenche.²


- 4 Dans l'onglet **Sons**, cliquez sur **Alarme** et choisissez le son qui sera émis.


- 5 Activez votre **alarme de glucose élevé** en choisissant Alarme glucose élevé et en répétant les mêmes étapes.³




FreeStyle
Libre 2
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DU TAUX DE GLUCOSE FLASH


www.myFreeStyle.be


life. to the fullest.[®]
Abbott



RENSEIGNEMENTS Disponible chaque jour ouvrable de 8:30 à 17:00

B 0800 167 72

L 8002 54 87

 0032 800 167 72

1. Consultez le manuel d'utilisation de FreeStyle LibreLink sur myFreeStyle.be pour plus d'information.

2. 70 mg/dL est le taux de glucose bas défini par défaut mais il peut être réglé entre 60 mg/dL et 100 mg/dL.

3. 240 mg/L est le taux de glucose haut défini par défaut mais il peut être réglé entre 120 mg/dL et 400 mg/dL.

FreeStyle, Libre et les marques associées sont la propriété d'Abbott. Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les données sont simulées à titre d'illustration. Il ne s'agit pas de vrais patients ou données. Pour utiliser l'application FreeStyle LibreLink, vous devez vous inscrire à LibreView, un service fourni par Abbott et Newyu, Inc. Les données capturées par FreeStyle LibreLink seront automatiquement téléchargées vers LibreView lorsque le téléphone sur lequel il fonctionne est connecté à Internet. © **Abbott 2020** | Avenue Einstein, 14 - B-1300 Wavre. ADC-25205. 11/20 v2.0.