

## STA IN VERBINDING MET UW NAASTEN EN DEEL UW GLUCOSE-INFORMATIE VIA DE APPS FREESTYLE LIBRELINK EN LIBRELINKUP

### OM UW GEGEVENS TE DELEN, UITNODIG UW NAASTE OF UW ZORGVERLENER

1 **Nodig** hem uit via de FreeStyle LibreLink-app.




De persoon met wie u uw gegevens wenst te delen moet minstens 18 jaar oud zijn, anders kan zij zich niet registreren op de LibreLinkUp-app.

2 In het hoofdmenu klikt u op **Verbonden apps**.

4 Klik op **Verbinding toevoegen** en vul de voornaam, naam en het e-mailadres van uw naaste in.

3 Daarna klikt u op **Beheren** naast het LibreLinkUp-logo.

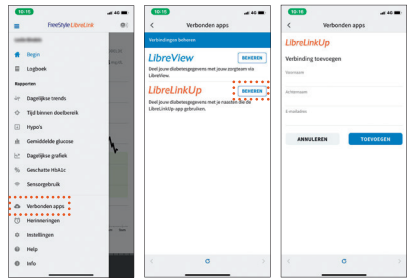

### UW NAASTE MOET NU DE LIBRELINKUP-APP DOWNLOADEN EN EEN ACCOUNT AANMAKEN\*

## LibreLinkUp

De LibreLinkUp-app is beschikbaar op Apple Store en Google Play.\*



1 Klik op **Account aanmaken**.



Om je in te schrijven op de LibreLinkUp-app moet je minstens 18 jaar oud zijn.

2 **Kies** uw land, **accepteer** de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

3 **Vul** uw naam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres in en **kies** een wachtwoord.




Gebruik hetzelfde e-mailadres als dat ingegeven tijdens het versturen van de uitnodiging om patiëntengegevens te delen via de FreeStyle LibreLink-app.

U ontvangt een e-mail om uw inschrijving te bevestigen. Klik op **E-mailadres controleren**.



Kijk in uw ongewenste mails.

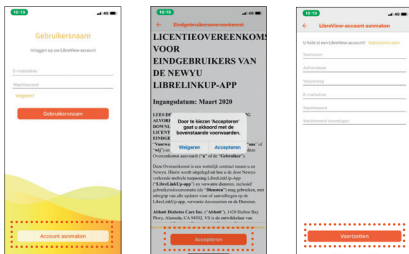

4

In uw LibreLinkUp-app klikt u op **Voortzetten** en op **OK**.



5

De uitnodiging verstuurd door uw naaste verschijnt nu op het scherm. Klik op **Accepteren**.




U bent nu verbonden met uw naaste. Hij kan uw glucosegegevens en trendpijlen lezen.



## UW NAASTE KAN DE MELDINGEN IN ZIJN LIBRELINKUP-APP INSTELLEN

1

In de LibreLinkUp-app klikt u op het pictogram van de Meldingsinstellingen.

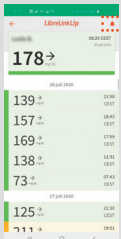

2

U kunt de meldingen voor de metingen van de glucosegegevens (wanneer de patiënt zich scant) en/of de alarmmeldingen voor hypo en hyper bij de patiënt activeren.



Om alarmmeldingen te ontvangen, moet de patiënt de alarmen op zijn FreeStyle LibreLink-up geactiveerd hebben.



**FreeStyle**  
**Libre 2**  
FLASH-GLUCOSEMONITORINGSYSTEEM



[www.myFreeStyle.be](http://www.myFreeStyle.be)

  
*life. to the fullest.®*  
**Abbott**



**INLICHTINGEN** Elke werkdag van 8:30 tot 17:00

**0800 167 72**

**0032 800 167 72**

\* LibreLinkUp is een mobiele applicatie, ontwikkeld en geleverd door Newyu, Inc. Het gebruik van LibreLinkUp vereist registratie bij LibreView, een dienst geleverd door Abbott en Newyu, Inc.

De mobiele app LibreLinkUp is niet bedoeld als primaire glucosemonitor: thuisgebruikers moeten hun primair(e) toestel(len) raadplegen en een professionele zorgverlener raadplegen alvorens medische interpretaties en behandelingsaanpassingen te doen op basis van de informatie die door de app wordt verstrekt. Zorgverleners moeten de door de app verstrekte informatie gebruiken in combinatie met andere klinische informatie. FreeStyle, Libre en gerelateerde merk aanduidingen zijn eigendom van Abbott. Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Gesimuleerde gegevens ter illustratie. Dit is geen echte patiënt of gegevens.  
© **Abbott 2020** | Einsteinlaan, 14 - B-1300 Waver. ADC-25536. 11/20 v2.0.